




Uw **CRY-O-PTIMAL** cold pack heeft een stabiele werking gedurende een heel lange tijd zodat uw therapie op zeer eenvoudige wijze gebeurt - tijdens uw behandeling of thuis.

De cold packs kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden om pijn en ontsteking te verzachten.

CRY-O-PTIMAL cold packs verminderen de zwelling en verzachten daardoor de pijn van zowel ontsteking van gewrichten en spieren, trauma van weefsels, blessures, alsook post-operatieve ongemakken.

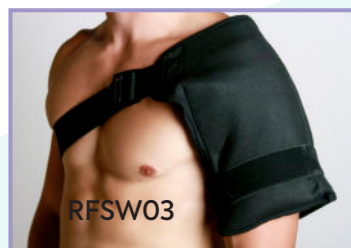

Kenmerken

De flexibele binnen-cellen zijn omgeven door een tweede gel. Hierdoor wordt het afkoelingsproces over een beduidend langere periode gespreid, aan een vrij stabiele temperatuur (2°C - 5°C)

- › Ontstekingsremmend
- › Spier-ontspannend
- › Verdovend
- › Pijnstillend
- › Continue cryotherapie met constante temperatuur
- › Veilig (geen vrieswonden)
- › Ergonomisch
- › Makkelijk in gebruik

Gebruiksaanwijzing

Het is belangrijk dat u dit product zorgvuldig en op correcte manier gebruikt.

1. Bewaar de cold pack voor minstens 3 uur in de diepvries.
2. Wanneer de diepvriezer een zeer lage temperatuur afgeeft kan de cold pack de eerste 10 minuten wat stijf zijn, haal hem zonnodig tijdig uit de vriezer.
3. Laat de cold packs in de voorziene containers van de bandages.
4. Herhaal indien nodig.

Code

RF Knee Wrap W/2 containers uni	RFKW03
RF Knee Wrap W/2 containers uni	RFSW03
RF Cold Packs (18 x 25 cm)	RFLDCP03